


# IDEXX Cancer Dx™-test:

## Interpretatie van resultaten bij klinisch zieke honden

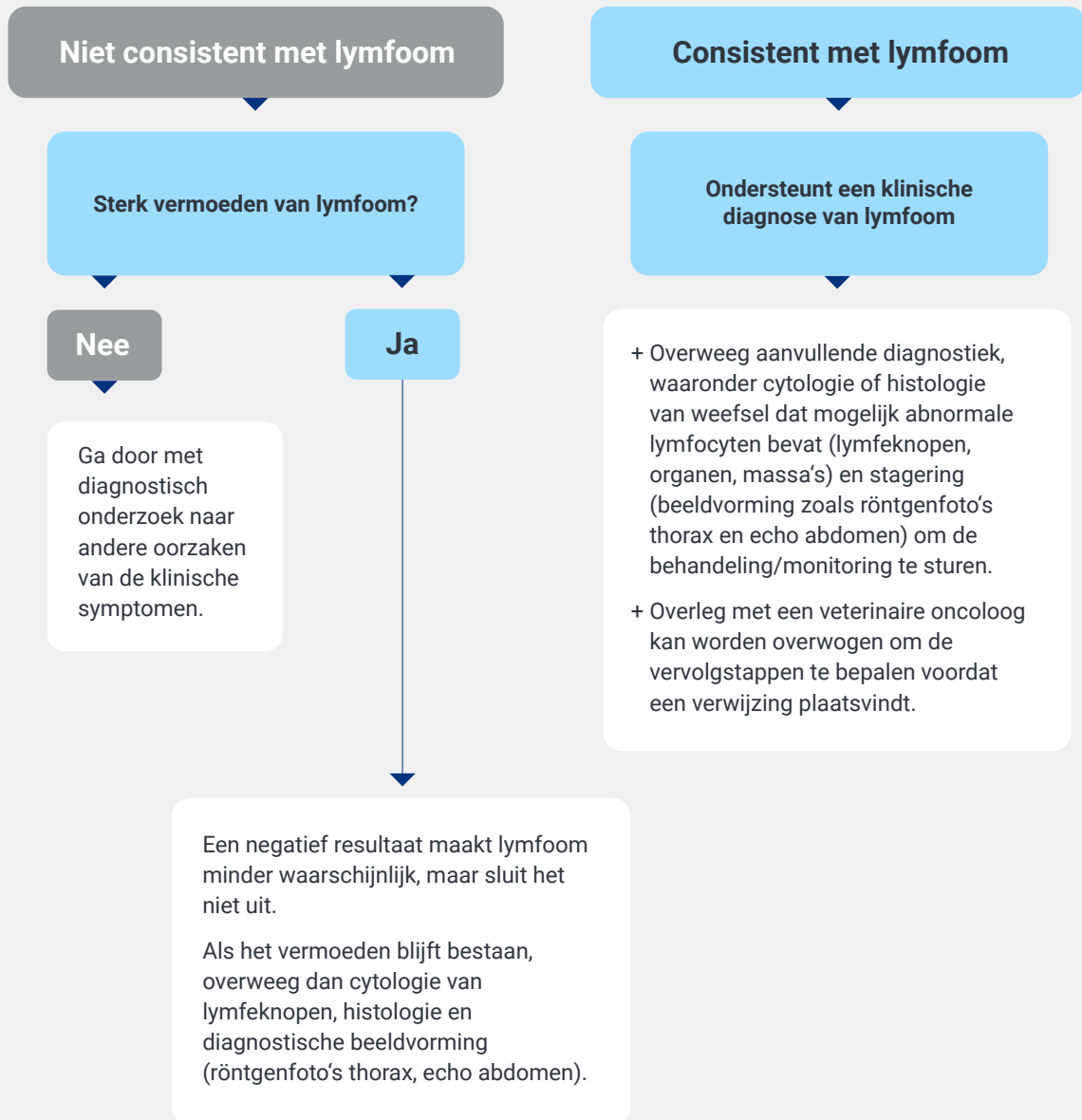

# IDEXX Cancer Dx™-test:

## Interpretatie van resultaten bij klinisch gezonde honden

### Niet consistent met lymfoom

Het resultaat wijst op de afwezigheid van een detecteerbaar lymfoom. Onderzoek de patiënt bij de volgende geplande gezondheidscontrole\*.

### Consistent met lymfoom

**Evalueer de volledige geschiedenis, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek**

**Aanvullend onderzoek kan worden overwogen om de aanwezigheid van de ziekte te bevestigen, waaronder:**

- + DNAB's of bipten van lymfeknopen/organen
- + Diagnostische beeldvorming (röntgenfoto's thorax en echo abdomen)
- + Flowcytometrie van bloed bij lymfocytose

**Als er geen lymfoom wordt vastgesteld, voer dan binnen 8-12 weken opnieuw lichamelijk onderzoek uit (eerder als er nieuwe symptomen optreden)**

\*De American Animal Hospital Association (AAHA) adviseert om oudere honden elke 6 maanden te onderzoeken en alle andere honden jaarlijks.<sup>1</sup>

#### Referentie

1. Creevy KE, Grady J, Little SE, et al. 2019 AAHA Canine Life Stage Guidelines. *J Am Anim Hosp Assoc.* 2019;55(6):267–290. doi:10.5326/JAAHA-MS-6999