


Catalyst-cortisoltest

Profiteer van resultaatsspecifieke interpretatieve opmerkingen

Aan de hand van de interpretatieve opmerkingen bij de Catalyst™-cortisoltest kunt u de beste vervolgstappen voor uw patiënt bepalen. Overweeg deze vragen en volg de onderstaande stappen om optimaal gebruik te maken van deze belangrijke informatie:

- + **Voert u meerdere cortisoltests uit op dezelfde patiënt?** Zo ja, en als u al een initiële cortisoltest hebt uitgevoerd, volgt u de instructies onder '**Voor aanvullende tests...**' om ervoor te zorgen dat elk kwantitatief resultaat op volgorde wordt gegroepeerd en om toegang te krijgen tot de **uitgebreide interpretatieve opmerkingen**.
- + **Hebt u de protocolinformatie ingevoerd?** Selecteer het juiste protocol en de juiste protocolstap voor de patiëntanalyse om resultaatsspecifieke interpretatieve opmerkingen te ontvangen. Zorg ervoor dat u de specifieke workflow voor uw analysator hieronder volgt:

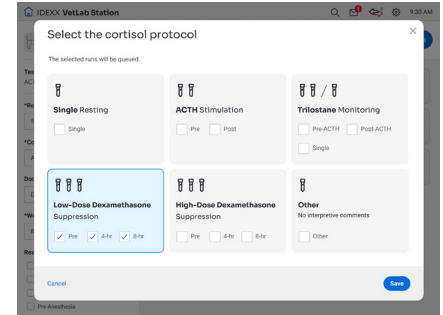

Voor initiële cortisoltests

Catalyst One™-chemieana-lyerator



Start de analyse op het IDEXX VetLab™ Station. Tik op het scherm 'Instrumenten selecteren' op **Catalyst One** en tik vervolgens op **Cortisol**. Selecteer het gewenste protocol en de bijbehorende aanvullende protocolstappen, tik op **Opslaan** en daarna op **Analyseren**.

Voor aanvullende tests en meerstaps cortisoltests

Alle protocolstappen die bij de verwerking van de initiële test zijn geselecteerd, worden weergegeven in de lijst 'In behandeling' op het beginscherm van IDEXX VetLab Station. Als het tijd is om het volgende monster te verwerken, tikt u op de volgende beschikbare test in de lijst, vervolgens op **In de wachtrij** en daarna op **Analyse starten**.

Catalyst Dx™-chemieana-lyerator



Start de analyse op het IDEXX VetLab Station zoals u gewend bent. Identificeer aan het einde van de analyse het protocol en de protocolstap wanneer daarom wordt gevraagd en tik vervolgens op **Indienen**.

Opmerking: Als u ervoor kiest om het protocol/de protocolstap later in te voeren, tikt u op de patiënt in de lijst 'In behandeling' en daarna op **Details toevoegen**. Selecteer vervolgens de protocolinformatie van de patiënt.

U kunt er als volgt voor te zorgen dat aanvullende resultaten worden gegroepeerd met het oorspronkelijke resultaat en om interpretatieve opmerkingen te ontvangen:

1. Zoek het initiële cortisolresultaat van de patiënt op het IDEXX VetLab Station **OF** selecteer de betreffende patiënt in de lijst 'Openstaand' op het beginscherm.
2. Tik op **Test toevoegen** en tik vervolgens op **Resultaten toevoegen**.
3. Selecteer **Catalyst Dx** op het scherm 'Instrumenten selecteren'.
4. Selecteer de protocolinformatie van de analyse en tik op **Indienen** als u daarom wordt gevraagd aan het einde van de analyse.

BELANGRIJK: als u een Catalyst One- en een Catalyst Dx-analysator hebt en de cortisoluitslagen van een patiënt wilt trenden en/of aanvullende tests/multistep cortisoltests wilt uitvoeren, raadt IDEXX aan alle cortisoltests op dezelfde analysator en met hetzelfde type monster uit te voeren.

De kwantitatieve resultaten en interpretatieve opmerkingen bekijken

Tik op het bericht in de linkerbenedenhoek van uw IDEXX VetLab Station om aan te geven dat de uitslagen van de patiënt klaar zijn. Wanneer aanvullende tests worden toegevoegd als onderdeel van meerstaps cortisoltests, worden de resultaten weergegeven van de laatste aanvullende test (boven) t/m de eerste test (onder). De uitgebreide interpretatieve opmerkingen worden bij de meest recente resultaten weergegeven.