


## Stroomdiagram: detectie en behandeling van een fosfaatoverschot bij katten met CNZ

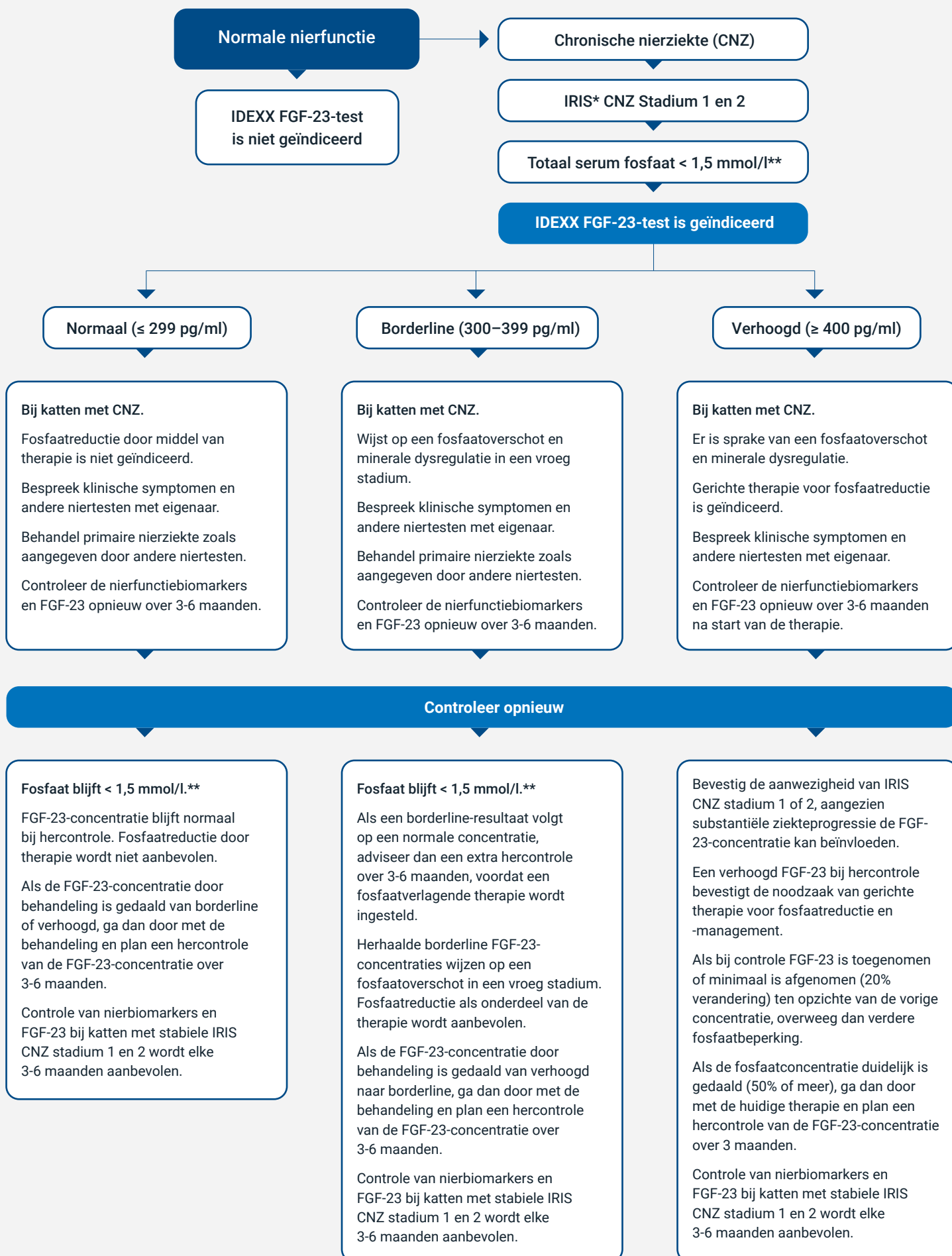

De IDEXX FGF-23-test maakt een wetenschappelijk onderbouwde benadering mogelijk om een fosfaatoverschot eerder op te sporen<sup>1-4</sup> en een fosfaatverlagende therapie in te stellen, ter ondersteuning van het managen van chronische nierziekte (CNZ) bij katten.

De IDEXX FGF-23-test mag alleen worden uitgevoerd bij katten die gediagnosticeerd zijn met, of sterk verdacht worden van IRIS CNZ stadia 1 en 2. De test wordt niet aanbevolen voor katten met ongecontroleerde hyperthyreoidie, ernstige anemie of systemische ontsteking.

**Let op:** Als u veranderingen aanbrengt in de behandeling die invloed hebben op de inname of absorptie van fosfaat, is het aan te raden om ten minste 2 maanden te wachten om FGF-23 opnieuw te controleren.

#### Referenties

1. Finch NC, Geddes RF, Syme HM, Elliott J. Fibroblast growth factor 23 (FGF-23) concentrations in cats with early nonazotemic chronic kidney disease (CKD) and in healthy geriatric cats. *J Vet Intern Med.* 2013;27(2):227–233. doi:10.1111/jvim.12036
2. Geddes RF, Elliott J, Syme HM. Relationship between plasma fibroblast growth factor-23 concentration and survival time in cats with chronic kidney disease. *J Vet Intern Med.* 2015;29(6):1494–1501. doi:10.1111/jvim.13625
3. Geddes RF, Finch NC, Elliott J, Syme HM. Fibroblast growth factor 23 in feline chronic kidney disease. *J Vet Intern Med.* 2013;27(2):234–241. doi:10.1111/jvim.12044
4. Seiler S, Heine GH, Fliser D. Clinical relevance of FGF-23 in chronic kidney disease. *Kidney Int Suppl.* 2009;76(114):S34–S42. doi:10.1038/ki.2009.405

\* IRIS is een afkorting van International Renal Interest Society

\*\* Volgens de IRIS-richtlijnen